

AIRERX® DUSCH & HYGIENDYNA

Universell

Ger komfort, stabilitet och positionering. Enkelt handhavande. Tillverkad av tåligt och tvättbara material. Dyna 5cm hög med inkontinens överdrag.

Avsedd användning: dusch/hygiendyna att nyttja vid sittande i dusch/hygien stolar/pallar. Universell, för att passa så många dusch/hygien stolar/pallar som möjligt. Avsedd som förebyggande av trycksår och/eller del som lösning för brukare som löper hög risk att utveckla trycksår. Kontroll av uppfyllnad görs regelbundet av behörig förskrivare/personal. Dynan kan användas på stolar med hygienurtag, både fram och bak.

Förväntad livslängd: 5 år.

Rekommenderad brukarvikt max: 110 kg.



Teknisk specifikation

Benämning:	Mått (BxDxH):	Öppningsmått hål (BxD):	Art.nr:
AireRx® Dusch & Hygiendyna - Dyna komplett	44x44x5cm	20x24cm	AR240
AireRx® Dusch & Hygiendyna - Dyna komplett	44x49x5cm	20x24cm	AR241
AireRx® Dusch & Hygiendyna - Överdrag extra	44x44x5cm	Avsedd för art. AR240	AR240-Ö
AireRx® Dusch & Hygiendyna - Överdrag extra	44x49x5cm	Avsedd för art. AR241	AR241-Ö

AIRERX® DUSCH & HYGIENDYNA

Universell

Rengöring/Rekonditionering

Dynan: Rengör med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller mildt desinfektionsmedel. Alternativ rengöring är: spola av med vatten för hand eller i duschen, tvättmaskin 40grader (normal program) eller 60grader (max 30 minuters program). Vid tvätt i maskin, kontrollera innan att dynan får plats i trumman. Använd gärna en tvättpåse för att undvika onödigt slitage. Kan även tvättas i tvättkabinett. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Använd ej blekmedel. Torkning - kan lufttorkas, torka i torkskåp på låg värme, blåsas med tryckluft etc. Mer info kontakta Salubrious AB.



Överdrag: tvättas i maskin på max 60 grader skonsam tvätt. Använd neutralt tvättmedel och/eller torka av med desinficeringsmedel. Kan lufttorkas eller torkas i torkskåp på låg temperatur, max 30°C.

Montering

Kontrollera först rätt placering av dyna och överdrag på dess etiketter. Blåa delen av överdrag uppåt samt fyrkant på dynbas nedåt. Se till att överdragets dragkedja är stängd. Dynan kan placeras med öppningen bak eller fram, beroende på Er stol. I varje hörn (4st) finns kardborreband, dessa träs runt ryggrör/benstöd/stolsram för bästa fixering.

AireRx dynor följer MDR2017/745 som klass 1 produkt.

Dynan kan till viss del anpassas i dynbasen, med bibehållen CE-märkning. Krav är att brukaren aldrig utsätts för fara/risk och är utförd av behörig/kunnig personal. Önskas anpassning, vänligen kontakta Salubrious för diskussion. Observera att Ert överdrags passform ej är perfekt efter anpassning. Instruktioner om hur anpassning görs, vänligen kontakta Salubrious AB på tel: 031-7305800.

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall alternativt återvinns enligt vissa avtal.

Transportpåse / Kartong sorteras i rätt behållare för avfall.

