


Made in Sweden

AireRx®

# Utjämningsplatta

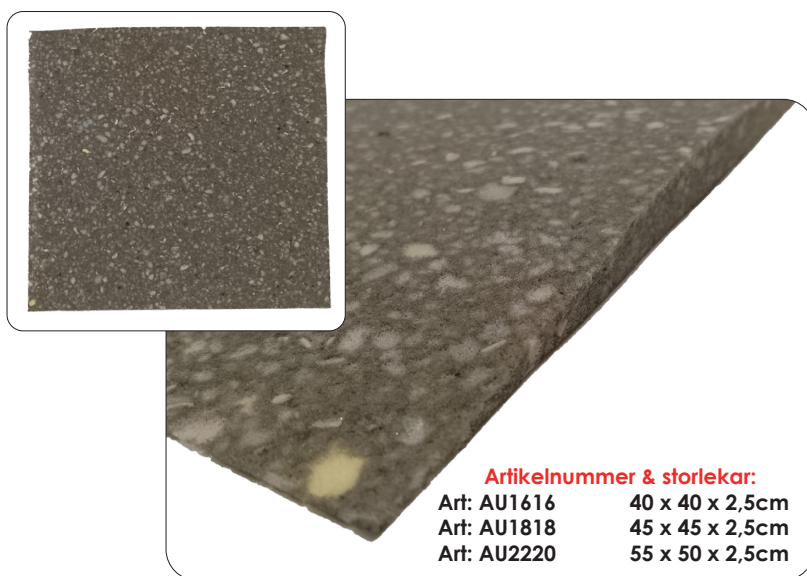

**Artikelnummer & storlekar:**

Art: AU1616	40 x 40 x 2,5cm
Art: AU1818	45 x 45 x 2,5cm
Art: AU2220	55 x 50 x 2,5cm

- Går att klippa i, efter önskad storlek
- Används inne i överdrag eller under överdrag vid utänjd hängmattesits
- Material – högdensitetsskum
- Utjämningsplattan kan användas för alla befintliga dynor och rullstolar på den svenska marknaden

**Bruksanvisning:**

1. Kapa till önskat mått med hjälp av kniv eller sax.
2. Placera utjämningsplattan under dynan i överdraget ELLER under överdrag OCH dyna.
3. Den konkava delen på plattan ska vara nedåt i sitsen.

**Tvätt/ rengöring:**

1. Rengör med ljummet vatten och tvällösning eller desinfektionsmedel.
2. Eftertorka med rent vatten.
3. Undvika att sänka ner produkten i vatten. Detta medför LÅNG torktid.
4. Efter rengöring - låt torka!



Utjämningsplattan ser ut så här i genomskärning. På det tjockaste stället är den 25 mm.



Sorteras som brännbart avfall



CE