

-Soof-

Denna manual skall användas för den Soofdyna som erhållits. Manual baseras på tillverkarens manual och måste läsas helt av patient/vårdare samt förstås innan nyttjande av produkt. Om Ni känner Er osäkra, kontakta kunnig personal, förskrivare alternativt Salubrious AB.

Avsedd användning: Soof dynan är avsedd att vara en del av en övergripande och förebyggande vård/behandlingsregim. Soof dynan kan nyttjas för att hjälpa till att förebygga trycksår och förbättra hållningen för individer. Soof dynans konstruktion premierar bra mikroklimat och högluftighet. En kunnig/ansvarig förskrivare/yrkesperson inom sittande och positionering, ska fastställa produktens lämplighet baserad på användarens/brukarens individuella behov. Är avsedd att möta specifika behov hos en patient/brukare som använder rullstol och annat sittande såsom exempelvis fåtölj, soffa. Kontroll av uppfyllnad ska göras regelbundet.



Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3

-Soof-


Placering:

Soof är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Soof gör följande:

1. Hitta vita etiketten på överdragets insida vid dragkedjan. Där finns text bak/ner med pil. Etiketten ska vara nedåt och placeras mot stolens rygg. För att säkerhetsställa korrekt placering av dynbas, se etikett på dynbasens undersida. Där återfinns ordet DOWN - denna sida mot sitsen.
2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget hamnar bak på stolens/rullstolens sittyta mot ryggen. Vita etiketten på insidan av överdraget skall vara nedåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget efter tvätt.
3. Se till att dragkedjan på överdraget är stängt. Nu är Din dyna klar att användas!
4. Om ni använder utjämningsplatta i skum, nyttjas främst vid hängmattesits. Kapa utjämnings plattan med sax eller kniv i önskad storlek. Placeras under dynan, antingen innanför eller utanför överdraget. **OBS:** Nyttjas enbart om behov finns.
5. Dynbasens bakre hörn kan kapas för att ge utrymme för rullstolens ryggstödsrör med bibehållen CE-märkning. OBS. Kapa ej mer än vad som krävs för att bibehålla dynans form och funktion.
6. Dynbasen är samma över allt. Detta innebär att en rektangulär storlek exempelvis 45x40cm också är 40x45cm. Tänk på vid placering att överdragets antiglidmaterial och dragkedja ska vara mot stolens sits. Dynbasen kan inte läggas fel i överdraget. Enda att bejaka är att dynbas etiketten ska vara nedåt så inte etiketten stör känsliga brukare.

Dragkedjan placeras bak på stolens/ rullstolens sittyta.

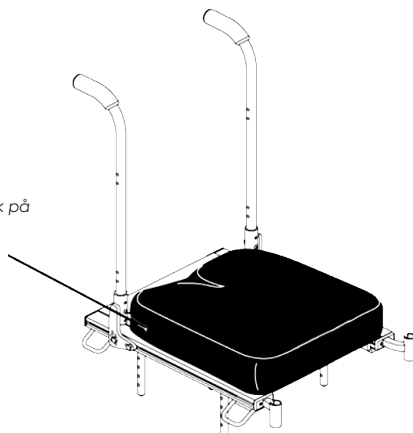


Förvaring:

Soof bör förvaras i rumstemperatur på en ren och torr plats när den inte används.

-Soof-

Rengöring:

1. Öppna svarta överdraget och dra ut dynan (bild nedan). Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka, torka i torkskåp eller torktumlning på **låg** temperatur, max 30°C.
Använd ej blekmedel.
2. Dynstomme tvättas i maskin på 60°C i valfri tvättpåse inklusive mildt desinfektionsmedel (undvik centrifugering på grund av onödigt slitage och dynan torkar ändå snabbt), alternativt spola/sänk ner dynstommen i vatten med mildt desinfektionsmedel. Du kan även rengöra dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller mildt desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att skölja bort tvålrester med rent vatten. Låt dynan lufttorka eller torka i torkskåp på **låg** värme.
Vid tvätt av dynbas i tvättmaskin, måste dynbasen ligga fritt i trumman. Ej ligga böjd. Om dynbasen är böjd i trumman, kan formen förändras/böjas. Detta påverkar inte dynans funktion men är ej kosmetiskt tilltalande. Ni kan torka dynbasen med tryckluft - detta ger snabb torkning av dynbas. Soof dynan går även att tvätta i Tvätt kabinett (stor tvättmaskin, där produkter rullas in).
3. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan.

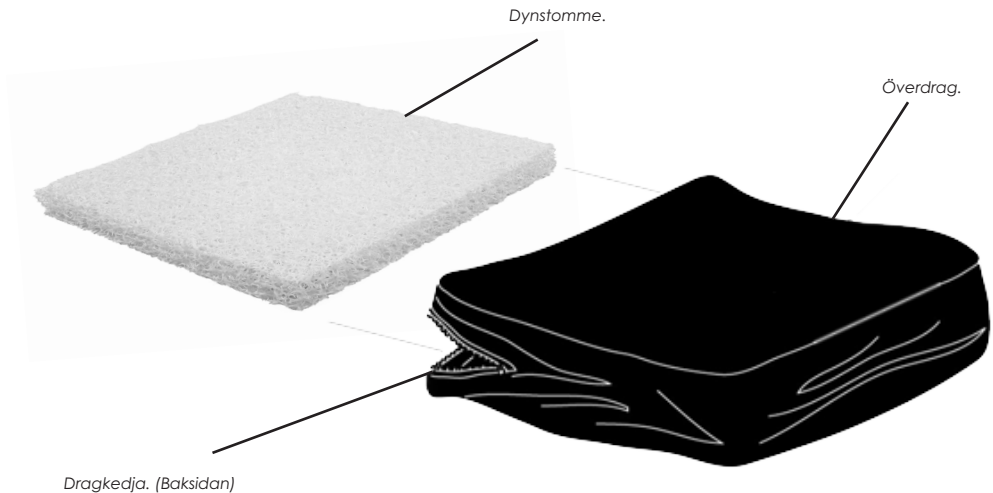



Soofdynan följer MDR2017/745 som klass 1 produkt.

Uppfyller ISO 8191-1+2, EN 1021-1+2.

Dynans förväntade livslängd: 5år.

Er dyna kan till viss del anpassas i dynbasen, med bibehållen CE-märkning.
Ett krav för bibehållen CE-märkning är att brukaren aldrig utsätts för fara/risk.

Observera att Ert överdrags passform ej är perfekt efter anpassning.

Önskas tips om anpassning, vänligen kontakta Salubrious AB på tel: 031-7305800

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall alternativt (enligt överenskommelse/avtal) kan Er Soof dyna (exkl. överdrag) returneras till Er återförsäljare/ Salubrious AB. Salubrious AB returnerar dynan till producent för granulering av materialet för tillverkning av ny dyna.

Kartong återvinns som returkartong.

