

# AIRERX® VADBAND

Ger komfort, positionering och luftighet. Tillverkad av tåligt material och mesh för egenskaper.

Avsedd användning: vadbånd att nyttja vid sittande i rullstol eller andra typer av hjälpmedel avsedda för sittande där produkten är applicerbar. Vadbåndet ger brukaren komfort/avlastning och stöd vid sittande och hjälper till att motverka att smalben/underben/fötter åker in under rullstolens sits och bakom fotplattor. Kan även användas för att positionera spastiska (nyttjas då framför brukares smalben/underben).

Förväntad livslängd: 2år.

## Rengöring/Rekonditionering

Innan tvätt rekommenderar vi att åter placera kardborrebanden på vadbåndet, så kardborreband inte greppar tag i andra produkter. Vadbåndet kan tvättas i 60 grader i maskin skonsamt tvätt. Använd neutralt tvättmedel. Lufttorka eller torka i torkskåp.

## Montering

Monteras med två kardborreband på vardera benstöd. Kardborrebanden används för att få rätt bredd och stretch. Bifogat finns 4st bitar självhäftande kardborreband (välj hona/hane som passar Er inställning). Placeras på vardera benstöd. Produktens kardborreband träs runt dessa självhäftande bitar, som minimerar att vadbåndet ändrar läge/höjd.



(FRAM)



(BAK)

## Teknisk specifikation

| Benämning:             | Mått (BxH): | Storlek:                      | Art.nr:           |
|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| AireRx® Vadbånd Small  | 23x8cm      | Passar rullstolsbredd 25-40cm | SMALL<br>AR231-S  |
| AireRx® Vadbånd Medium | 39x9cm      | Passar rullstolsbredd 40-50cm | MEDIUM<br>AR231-M |
| AireRx® Vadbånd Large  | 49x10cm     | Passar rullstolsbredd 50-60cm | LARGE<br>AR231-L  |