

## AIRERX® VADMATTA/VADSKYDD

**Ger komfort, positionering och luftighet. Tillverkad av tåligt material och mesh för egenskaper.**

Avsedd användning: vadmatta/vadskydd att nyttja vid sittande i rullstol eller andra typer av hjälpmedel avsedda för sittande där produkten är applicerbar. Vadmattan ger brukaren komfort/avlastning och stöd vid sittande och hjälper till att motverka att smalben/underben/fötter åker in under rullstolens sits och bakom fotplattor. Kan även användas för att positionera spastiska (nyttjas då framför brukares smalben/underben).

Förväntad livslängd: 2år.

### Rengöring/Rekonditionering

Innan tvätt rekommenderar vi att åter placera kardborrebanden på vadmattan, så kardborreband inte greppar tag i andra produkter. Vadmattan kan tvättas i 60 grader i maskin skonsamt tvätt. Använd neutralt tvättmedel. Lufttorka eller torka i torkskåp.

### Montering

Monteras med de två kardborrebanden på vardera benstöd. De två breda kardborrebanden används för att få rätt bredd och stretch. Det smalare kardborrebandet justerar höjden för skyddet och placeras antingen på benstödet eller ramen. Bifogat finns 4st bitar självhäftande kardborreband (välj hona/hane som passar Er inställning). Placeras på vardera benstöd. Produktens kardborreband träs runt dessa självhäftande bitar, som minimerar att vadmattan ändrar läge/höjd.



(FRAM)

(BAK)



### Teknisk specifikation

Benämning:	Mått (BxH):	Storlek:	Art.nr:
AireRx® Vadmatta Small	23x18cm	Passar rullstolsbredd 25-40cm	SMALL AR230-S
AireRx® Vadmatta Medium	39x20cm	Passar rullstolsbredd 40-50cm	MEDIUM AR230-M
AireRx® Vadmatta Large	49x24cm	Passar rullstolsbredd 50-60cm	LARGE AR230-L