

# Produktblad & Bruksanvisning

Dyna Toaletsits Universal Gel Ovations, inkl. överdrag

## Storlekstabell

Toaletsitsdyna av gel, inkl. överdrag – Universal!

Art.nr	Mått	Tjocklek
DGTP16355WC	380 mm x 95 mm	15 mm

Överdrag avtagbara – avtorkbart, antiglid, kardborreband och tvättbara i maskin.

Art.nr	Mått	Tjocklek
DGTP1635CV	380 mm x 95 mm	Avsedd för toaletsits dyna - DGTP16355WC



Toaletsitsdyna av gel för avlastning och komfort. Universal mått. Levereras parvis. Gelet är uttagbart ur överdraget. Överdraget är av inkontinens material, typ Dartex. Antiglid samt 4st kardborreband för fastsättning. Passar även toaförhöjning.

## Rengöring

**Gel:** Gelet handtvättas och rengörs genom avtorkning med rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel.

**Överdrag:** Överdraget tvättas i maskin på max 60 grader skonsam tvätt. Använd neutralt tvättmedel och/eller torka av med desinficeringsmedel. Kan lufttorkas eller torkas i i torkskåp.

## Montering

Placera de två stycken toaletsitsdynorna på toaletsitsen och spänn fast med kardborreband (2st per halva). Kardborrebanden kan klippas av om önskar.



**Salubrious**  
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se