

AIRERX® HYGIENUNDERLÄGG

Inkontinens samt Fuktabsorberare till AireRx sittdynor.

Avsedd användning: Inkontinens/fukt inlägg för att absorbera vätska som kan tränga igenom dynans bas. Detta håller brukaren och miljön torr/sval.

Är tänkt att användas till dynor som har en luftigt öppen struktur, där vätska kan transporteras igenom dynans bas. Inlägget absorberar ca 1 liter vätska (beroende på storlek).


Placering: inlägget ska placeras mellan dynans bas och undersida överdrag - se bild. **OBS - ljus gröna sidan** ska vara mot brukaren/uppåt inne i överdraget.

Tvätt: Tvättas i max 90° med kulörtvättmedel, utan sköljmedel. Torkas hängande eller i torktumlare på låg temperatur. Vi rekommenderar att man tvättar inlägget före första användning för bättre uppsugningsförmåga.

Material: 80% polyester, 20% bomull, Polyuretan folie undersidan.



Denna sida UPP
mot brukare.

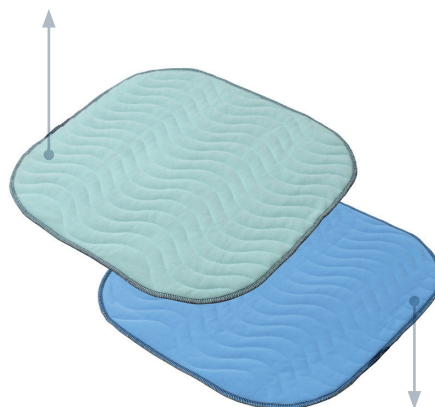

Denna sida NED
från brukare.



Storlekar: Se sida 2.



Storlekar

Benämning:	Mått (BxH):		Art.nr:
AireRx® Hygienunderlägg	35x35cm	Passar sittdyna 35x35cm	AH001-3535
AireRx® Hygienunderlägg	35x40cm	Passar sittdyna 35x40cm	AH001-3540
AireRx® Hygienunderlägg	40x40cm	Passar sittdyna 40x40cm	AH001-4040
AireRx® Hygienunderlägg	40x45cm	Passar sittdyna 40x45cm	AH001-4045
AireRx® Hygienunderlägg	45x40cm	Passar sittdyna 45x40cm	AH001-4540
AireRx® Hygienunderlägg	45x45cm	Passar sittdyna 45x45cm	AH001-4545
AireRx® Hygienunderlägg	45x50cm	Passar sittdyna 45x50cm	AH001-4550
AireRx® Hygienunderlägg	50x45cm	Passar sittdyna 50x45cm	AH001-5045
AireRx® Hygienunderlägg	50x50cm	Passar sittdyna 50x50cm	AH001-5050
AireRx® Hygienunderlägg	55x45cm	Passar sittdyna 55x45cm	AH001-5545
AireRx® Hygienunderlägg	55x50cm	Passar sittdyna 55x50cm	AH001-5550

