



**Gulmarkerade
artiklar finns på
avtal, övriga ej.
Priser är
ungefärliga.**

KATALOG - 2021
**TRYCKAVLASTANDE
GELPRODUKTER**

Tryckavlastade produkter för applicering på exempelvis rullstolar, duschstolar och arbetsstolar, rullatorer, gåbord, hygienstolar, toalettsitsar etc.

Gel Ovation tryckavlastande produkter är enkla att montera och löser vardagliga problem för tryck känsliga personer på ett enkelt sätt. Skydden är kostnadseffektiva och harmoniserar med tex rullstolen. Alla Gel Ovation produkter innehåller gel eller både gel och skum. Överdraget är av nylon/chloropren gumm (liknande vådräkt). Produkterna innehåller EJ latex. 1-års garanti.

I denna broschyr ger vi exempel och förslag på montering av Gel Ovation produkter. Ni är varmt välkomna att pröva produkterna på andra ställen och andra produktgrupper. Viktigaste är att brukaren får en bättre situation.

Rengöring: Torka av produkten med tvållösning, rengöringsmedel eller mildt desinfektionsmedel utan slipmedel och starka kemikalier. Fukta en ren trasa och eftertorka. Använd ej tvättmaskin.

GelOvation svarta produkter går även att använda i våta miljöer, exempelvis dusch. Likväl går blåa att använda i torra miljöer. Enda skillnaden är att svarta produkter behöver längre torktid än blåa och ska torka helt innan nyttjas i våt miljö igen. OBS - svarta produkter märkt med symbol kan ej nyttjas i våta miljöer.



Tryckavlastning för ben och fötter	4
Tryckavlastning för armar	11
Tryckavlastning Universal	14
Tryckavlastning Universal - Göra själv	16
Tryckavlastning för rygg	18
Tryckavlastning för dusch, toa och våta utrymmen	19
Tryckavlastning för bälten och selar	27

Tryckavlastning för ben och fötter

Fotskydd av gel/skum eller gel, för applicering på fotstöden



GFPCA

Universal passform

Montering

Malla av hålbilden på bottenplattan på fotstödet. Borra med 6 mmborr. Skruva fast bottenplattan med bifogade skruvar och muttrar. Gör rent bottenplattans ovansida med ex. T-röd och låt torka. Placera de självhäftande gel/skumskydden på plattan. Tryck i 10 sekunder. Kan även använda breda kardborreband (bifogas i förpackning) mellan fotplattornas ovansida och fotskyddets bottenplatta (undersida). Ger enklare rekonditionering, eventuell justering och ni behöver ej borra. Rengör nog innan placering av kardborrebanden, använd tex T-röd!

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
GFPCA	200 mm	150 mm	30 mm	1028 kr/par



EGFO

Passar bland annat Cross

Montering

Dra på gelskyddet från sida, med den svarta gel sidan uppåt. Säkerställ höger på höger fotplatta etc. Säkerställ att gelet även är på fotplattans framsida/kant. Justera kardborrebanden på undersida för passform. Passar bland annat Cross standard/förlängda fotplattor.

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
EGFO	160 mm	200 mm	20 mm	1795 kr/par



EGFOE

Passar bland annat Cross förlängda

Montering

Dra på gelskyddet från sida, med den svarta gel sidan uppåt. Säkerställ höger på höger fotplatta etc. Säkerställ att gelet även är på fotplattans framsida/kant. Justera kardborrebanden på undersida för passform. Passar bland annat Cross standard/förlängda fotplattor.

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
EGFOE	230 mm	200 mm	20 mm	1895 kr/par

RFPC2

Passar bland annat Azalea & Dahlia

Montering

Lägg fotskyddet av gel på fotplattan med svarta sidan uppåt. Spänn fast med kardborrebanden runt stolens fotplatta. Upprepa samma montering för båda fotplattorna. Passar bland annat Azalea/Dahlia centralplacerad fotplatta.

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
RFPC2	320 mm	170-85 mm	20 mm	2125 kr/par

Fotskydd universal hel fotplatta



DGSCFPO

Fotskydd gel Universal för hel fotplatta

Montering: Lägg fotskyddet på fotplattan med svarta sidan uppåt. Spänn fast med kardborrebanden runt stolens fotplatta. Insydda kardborreband på undersida skydd för montering på fotplattans bas.

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
DGSCFPO	390 mm	250 mm	20 mm	1995 kr/st

Polstring för häl, applicering fotplattans hälband




HLC3

Montering

Fäst kardborrebandet runt fotplattans hälband.

Artikel	Längd	Höjd	Tjocklek	Pris
HLC3	140 mm	50 mm	20 mm	2125 kr/par

Knäskydd för vinkelställbara benstöd

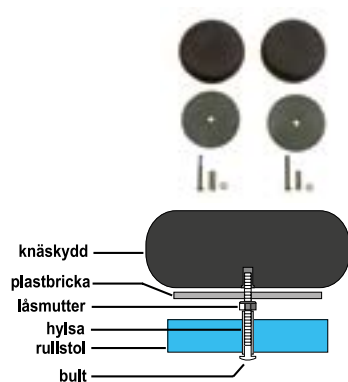

KBE, KBET

Skyddar knäet mot abduktionstryck

Montering: Byt ut den nuvarande övre skruven och muttern på benstödet vid knäleden, mot medföljande skruv och låsmutter. Använd distans för att undvika eventuellt glapp i skruvhålet för de medskickade skruvarna. Dra fast låsmuttern på insidan av benstödet för fixering. För sedan på det runda plastskyddet, med den släta sidan från benstödet. Skruva sedan fast skyddet på skruven. Är hylsan för lång, kapa i lämplig längd. Använd Loctite på skruv för bästa montering och hållbarhet.

Artikel	Diameter	Tjocklek	Pris
KBE	100 mm	35 mm	769 kr/par
KBET	100 mm	25 mm	769 kr/par

Knäskydd för benstöd



KBM, KBMT

Skyddar knäet mot abduktionstryck

Montering: Placera skyddet på benstödet rör med den bifogade klämman för önskad position. Runda plastskyddet (släta sidan bort från benstödet) ska föras på skruven innan skyddet skruvas fast. Passar rör med diameter: 22 mm till 25 mm. Om ni har mindre rör, gör röret större med hjälp av exempelvis hylsa, slang, tejp etc. för att få grepp och skruva fast. Använd Loctite på skruv för bästa montering och hållbarhet.

Artikel	Diameter	Tjocklek	Pris
KBM	100 mm	35 mm	839 kr/par
KBMT	100 mm	25 mm	839 kr/par

Benstödsstydd för benstödet mellan och övre del



LPW

Skyddar brukaren mot tryck

Montering: Benstödsstydden appliceras med hjälp av kardborreband runt röret.

OBS - Benstödsparet har en höger- och en vänstersida. Se till att gelsidan är vänd mot brukaren.

LLPW

Skyddar brukaren mot tryck

Montering: Benstödsstydden appliceras med hjälp av kardborreband runt röret.

OBS - Benstödsparet har en höger- och en vänstersida. Se till att gelsidan är vänd mot brukaren.

Artikel	Längd	Tjocklek	Passar rör med diameter	Pris
LPW	240 mm	10 mm	18-25 mm	583 kr/par
LLPW	270 mm	10 mm	18-25 mm	649 kr/par

Skydd vid borttagna benstödsrör



LHC

Skyddar brukarens ben mot tryck

Montering: Skydden appliceras runt fästet för benstöden med kardborreband. (Ytterligare säkring för skyddet genom det öljetterade hålet. Snöre eller buntband.)

OBS - paret benstöd har en höger- och vänstersida. Tillse att gelsidan är vänd mot brukaren.



Artikel	Längd	Tjocklek	Pris
LHC	140 mm	10 mm	628 kr/par

Knä-/skulderskydd för valfri placering



KPR, KPRQ

Kan placeras på önskad position, ex. skuldror som tar i ryggrören och unika punkter för benrören

Montering: Appliceras med kardborre-band runt röret. Kardborrebandet ska vara IFRÅN den yta som önskas skyddas.

Artikel	Längd	Tjocklek	Passar rör med diameter	Pris
KPR	95 mm	10 mm	18-25 mm	639 kr/par
KPRQ	120 mm	12 mm	25-30 mm	935 kr/par

Vadskydd delbart med snabbkoppling



GHSP-2, GHS-2, GHSB-2, GHSBX-2

Används för t.ex. "swing away"-benstöd och enkel uppresning

Vadskydd delbart med snabbkoppling för tex "swing away"-benstöd och enkel uppresning. Vadskyddet ger stöd för vaderna och förhindrar att fötterna åker av fotplattformarna. Delbarheten gör det lätt vid avtagning av benstöd. Vadskyddet kan även användas åt andra hållet för kontroll av spastiska personers ben. Mått på skydden ovan är de två gelsidorna tillsammans.



Montering: Monteras med de två kardborrebanden på vardera benstöd. De två breda kardborrebanden används för att få rätt bredd och stretch. Det smalare kardborrebandet justerar höjden för skyddet och placeras antingen på benstödet eller ramen.

Exempel: Mått på skydd (de två delarna ihopsatta):

Bredd 390 mm, höjd 200 mm, tjocklek 10 mm. Passar rullstolar med måtten 400-500 mm i bredd.

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
GHSP-2	230 x 160 mm - Justerbart 25-40 cm mellan benstödsrör	10 mm	1015 kr/st
GHS-2	390 x 200 mm - Justerbart 40-50 cm mellan benstödsrör	10 mm	1157 kr/st
GHSB-2	490 x 240 mm - Justerbart 50-60 cm mellan benstödsrör	10 mm	1618 kr/st
GHSBX-2	590 x 240 mm - Justerbart 60-70 cm mellan benstödsrör	10 mm	1765 kr/st

Vadskydd helt



GHSP, GHS, GHSB, GHSBX

Ger stöd för vaderna och förhindrar att fötterna åker av fotplattorna

Vadskyddet ger stöd för vaderna och förhindrar att fötterna åker av fotplattorna. Vadskyddet kan även användas åt andra hållet för kontroll av spastiska personers ben.

Montering: Monteras med de två kardborrebanden på vardera benstöd. De två breda kardborrebanden används för att få rätt bredd och stretch. Det smalare kardborrebandet justerar höjden för skyddet och placeras antingen på benstödet eller ramen.

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
GHSP	230 x 160 mm - Justerbart 25-40 cm mellan benstödsrör	10 mm	685 kr/st
GHS	390 x 200 mm - Justerbart 40-50 cm mellan benstödsrör	10 mm	795 kr/st
GHSB	490 x 240 mm - Justerbart 50-60 cm mellan benstödsrör	10 mm	1339 kr/st
GHSBX	590 x 240 mm - Justerbart 60-70 cm mellan benstödsrör	10 mm	1495 kr/st

Tryckavlastning för armar

Gelskydd för exempelvis Cross-rullstolens armstöd av konturerad gel



ECAP-1, ECAP-2

Passar Cross-rullstolens armstöd


Gelskydd för exempelvis Cross-rullstolens armstöd av konturerad gel. Gelskyddet gör det mjukt och undviker tryck på underarm och armbåge. Armstödsskyddet passar både höger och vänster sida



Montering: Skyddets sydda ficka på undersidan (mörkgrå), ska dras på armstödet främre del - svart tyg uppåt. Fäst sedan de två kardborrebanden på undersidan av armstödet. Svarta tyget ska vara på armstödet ovansida samt kardborrebanden ska vara mot rullstolens rygg.

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
ECAP-1	390 mm x 65 mm	15 mm	539 kr/st
ECAP-2	390 mm x 65 mm	15 mm	971 kr/par

Armstöd för rullstol

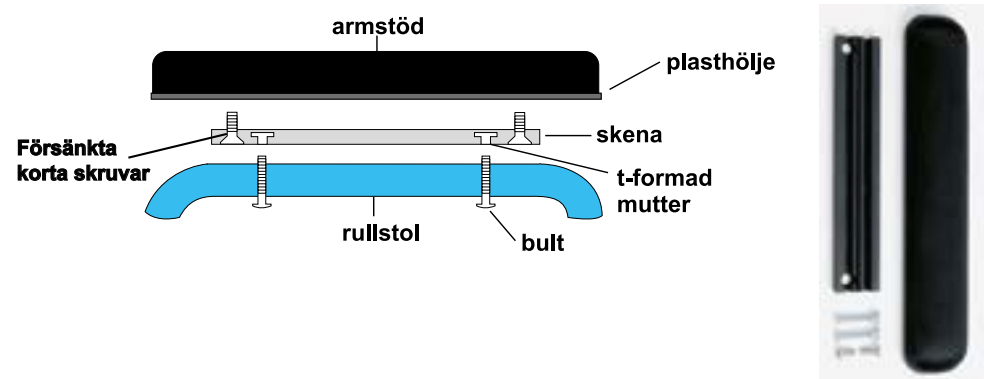

212TMS, 312TMS, 314TMS

För mjukare och tryckavlastande armstödsplatta

Montering: Universalskena bifogas alltid i denna förpackning. Skruva av befintligt armstöd på rullstolen. Applicera först GeOvationsarmstödet i plasthöljet och kontrollera att hålbilden passar. Placera skenan under plasthöljet, så hålbilden stämmer överens. Dra fast skenan med de försänkta korta skruvarna i vald hålbild. Använd bifogade bultar genom rullstolens armstödsram underifrån och skruva på de två T-formade muttrarna.

Montera armstödsyddet med tillhörande skena på rullstolens armstödsram framifrån, så de T-formade muttrarna passar i något av skenans undre spår. Här finns möjlighet för val av placering i sidled av armstödet tack vare två spår. Skruva fast de två längre bultarna underifrån och armstödet är monterat. Önskas mer stabilitet, använd lämplig bricka. Använd Loctite på skruv för bästa montering och hållbarhet.

Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
212TMS	300 mm	50 mm	30 mm	1525 kr/par
312TMS	300 mm	90 mm	30 mm	1599 kr/par
314TMS	360 mm	90 mm	30 mm	1695 kr/par

Underarms polstring av gel



Polstring som helhet med gel inuti



Gel som finns inuti överdraget

45755DSDCV

För mjukare och tryckavlastande underarmstöd

Gel med överdrag av neoprene. Fastsytt kardborreband på undersida av neoprene och motsvarande kardborreband i självhäftande inkluderas. Kan användas på valfria ställen/punkter där polstring, komfort, tryckavlastning önskas, exempelvis "vaggan"/underarmstöd för rullatorer.

Montering: Sätt de medföljande självhäftande kardborrebanden på önskat plats/område. Se till att plats/område är rengjort och fettfritt innan placering av självhäftande kardborreband (använd exempelvis T-röd). Placera sedan produktens kardborreband ihop med de självhäftande för önskad placering. **OBS** - vid demontering av gel polstringen, dra försiktigt isär de starka kardborrebanden.

45755DSDCVO

Bålstöds skydd av gel

Kan användas på valfria ställen/punkter. Exempelvis träs på ett bålstöd eller vaggan"/underarmstöd för rullatorer. **OBS** - kardborrebandsöppning på en kortsidan. Ingen "flärp" över öppning.

Montering: Montering sker som för art.nr: 45755DSDCV med skillnaden att det inte finns någon "flärp"/övervik över öppningen på ena kortsidan. Alternativ montering kan även vara att produkten träs på exempelvis ett bålstöd och kardborrebandet försluts.

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
45755DSDCV	190 mm x 115 mm	20 mm	552 kr/st
45755DSDCVO	190 mm x 115 mm	20 mm	552 kr/st

Finns i mer storlekar - kontakta Salubrious AB.

Tryckavlastning Universal

Universalskydd av gel med kardborreband



PTW6, PTW8

Skydd som gör rör och rörliknande delar mjukare

Montering: Gelplattan sätts fast med kardborrebandet. Exempel på användning: Benstödens mellandel och nedre del eller ställen där tryck uppstått med rörliknande föremål. Kardborrebandet ska vara IFRÅN den yta som önskas skyddas.

Artikel	Längd	Tjocklek	Passar rör med diameter	Pris
PTW6	150 mm	10 mm	18-25 mm	587 kr/par
PTW8	200 mm	10 mm	18-25 mm	678 kr/par

Självhäftande universalskydd av gel



34SP, 48SP, 412SP
1575SP, 2075SP, 2575SP

Exempel på användning: Rullstolens sidoskydd, joystick, rullstolsbord, armstöd, gåbord etc.

Montering: Ta av klistersidan/ undersidans skyddspapper. Gör rent appliceringsytan med ex. T-röd. Rengör för att få bort eventuellt fett och smuts. Tryck fast gelplattan under 10 sekunder. Ni kan även använda breda självhäftande kardborreband. Detta ger enkelhet vid rekonditionering och eventuell justering. Rengör nogga!



Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
34SP	80 mm x 100 mm	10 mm	355 kr/par
48SP	100 mm x 200 mm	10 mm	545 kr/par
412SP	120 mm x 300 mm	10 mm	698 kr/par



Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
1575SP	40 mm x 190 mm	10 mm	455 kr/par
2075SP	50 mm x 190 mm	10 mm	485 kr/par
2575SP	65 mm x 190 mm	10 mm	510 kr/par

Tryckavlastning Universal - Göra själv

Anpassningsbar silikonbaserad gelplatta

Mycket tryckavlastande silikonbaserad gelplatta, som går att klippa i önskad storlek, (vid klippning talkas klippytan för att motverka klubbighet). Kan användas i både våta och torra miljöer för att öka komfort i befintligt sittande samt punktavlasta.

1. Gelmattan kan i många fall ligga still utan fastsättning beroende på dess tyngd. Ifall fastsättning önskas, så rekommenderar vi följande alternativ:
2. Dubbelhäftande kardborreband (sätt hanen i gelet) pga. då är det mjuka kardborrebandet på hjälpmedlet.
3. Dubbelhäftande tejp kan nyttjas, men OBS då blir det en icke avtagbar lösning.
4. Beroende på vart gelet ska placeras så kan även antiglidmaterial, plast buntband etc. nyttjas för att öppna önskad effekt.

Typ av fastsättning varierar mycket beroende på situation. Viktigast är att ni uppnår önskad effekt. Om du är osäker kontakta Salubrious AB.



Art.nr: 1285HD



Artikel	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
355D	75 mm	130 mm	13 mm	199 kr/st
445D	100 mm	100 mm	13 mm	209 kr/st
465D	100 mm	150 mm	13 mm	299 kr/st
45755D	115 mm	190 mm	13 mm	399 kr/st
555D	130 mm	130 mm	13 mm	329 kr/st
575D	130 mm	180 mm	13 mm	399 kr/st
6755D	150 mm	190 mm	13 mm	537 kr/st
6595DD	165 mm	240 mm	13 mm	759 kr/st
775D	180 mm	180 mm	13 mm	599 kr/st
895D	200 mm	230 mm	13 mm	859 kr/st
1285HD	300 mm	220 mm	13 mm	965 kr/st
3105D	260 mm	76 mm	13 mm	385 kr/st
3125D	300 mm	76 mm	13 mm	450 kr/st
3145D	360 mm	76 mm	13 mm	506 kr/st
3165D	400 mm	76 mm	13 mm	580 kr/st
3185D	460 mm	76 mm	13 mm	632 kr/st
3205D	500 mm	76 mm	13 mm	939 kr/st
14145D	360 mm	360 mm	13 mm	1395 kr/st
16165D	400 mm	400 mm	13 mm	1598 kr/st
16185D	460 mm	400 mm	13 mm	1645 kr/st
18165D	400 mm	460 mm	13 mm	1645 kr/st
18185D	460 mm	460 mm	13 mm	1796 kr/st
18205D	500 mm	460 mm	13 mm	1949 kr/st
20185D	460 mm	500 mm	13 mm	1949 kr/st
20205D	500 mm	500 mm	13 mm	2220 kr/st

Önskas andra storlekar - Kontakta Salubrious AB

Tryckavlastning för rygg

Ryggskydd av gel för polstring av ryggstöd

GPSB16, GPSB18, GPSB20

Ryggskydd av gel för polstring av rullstolens ryggstöd. Gelytans höjd 10 eller 30 cm. Justerbar med kardborreband och öppning för körhandtagsrör.

Montering: Applicera ryggskyddet på övre ryggdel, genom att trä på ryggskyddet över rullstolens rygg. Kardborrebanden ska vara på baksidan av rullstolens rygg - bort från brukaren. Har rullstolen körhandtag och eventuella bromsar, se till att körhandtagsrören kommer i utrymmet i båda hörnen av ryggskyddet. Spänn fast ryggskyddet till önskad spänst med hjälp av existerande kardborreband runt ryggens sida (GPSB) samt baktill skyddet (BCC). Gör ni ryggskyddet mindre än måtten på produkten kan vissa veck uppkomma. Materialet går att spänna ut för ökat mått, håll er inom intervallerna nedan.



Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
GPSB16	400 x 300 mm - justerbart 35-42 cm mellan ryggrören	10 mm	1083 kr/st
GPSB18	450 x 300 mm - justerbart 40-47 cm mellan ryggrören	10 mm	1175 kr/st
GPSB20	500 x 300 mm - justerbart 45-52 cm mellan ryggrören	10 mm	1295 kr/st

BCC16, BCC18, BCC20



Artikel	Mått	Pris
BCC16	400 x 105 mm - justerbart 35-42 cm mellan ryggrören	955 kr/st
BCC18	450 x 105 mm - justerbart 40-47 cm mellan ryggrören	955 kr/st
BCC20	500 x 105 mm - justerbart 45-52 cm mellan ryggrören	1095 kr/st

Tryckavlastning för dusch, toa och våta utrymmen

Armstödsskydd, överdelen med gel



TACA

Passar bland annat duschstol Ocean, toalettarmstöd Support, Hi-loo 6 cm och 10 cm, duschstol Swift etc. Pröva Er fram!

Montering: Trä skyddet på armstödet med dragkedjan nedåt och stäng.

Artikel	Längd	Passar rördiameter	Pris
TACA	300 mm	Upp till 40 mm	589 kr/par

Knä- och skulderskydd



KPRA

Montering: Appliceras med kardborreband runt röret. Kardborrebandet ska vara IFRÅN den yta som önskas skyddas.

Artikel	Längd	Bredd	Passar rördiameter	Pris
KPRA	95 mm	10 mm	Från 18 mm till 25 mm	639 kr/par

Benskydd



LPWA

Montering: Benstödsskydden appliceras med hjälp av kardborreband runt röret. OBS - paret benstöd har en höger- och vänstersida. Tillse att gelsidan är vänd mot brukaren.

Artikel	Längd	Tjocklek	Passar rördiameter	Pris
LPWA	95 mm	10 mm	Från 18 mm till 25 mm	632 kr/par

Dyna av tryckavlastande gel, för hygien och duschstol



OSCSO, OSCSO1, OSCSO2

- OSCSO** – passar bland annat Ocean
- OSCSO1** – passar bland annat Carendo
- OSCSO2** – passar bland annat Ocean mjuksits oval

Dyna av tryckavlastande gel, för hygien och duschstol. Levereras med inkontinens överdrag som är avtorkbart och antiglid material på undersida. Spännen är inkluderat för bästa fastsättning. Passar bland annat Ocean, Carendo, Ocean mjuksits oval med hål (ej "hästsko form") etc.

Vi gör kundunika versioner för att utöka sortimentet och skapa standardversioner, med största sannolikhet med samma pris – kontakta Salubrious AB.

Montering: Placera geldynan på dusch eller hygienstolen. Öppningen åt samma håll som stolens sits öppning. De 4st kardborrebanden sätts fast runt/under stolens sits. Svarta spännet sätts baktill runt stolens ryggrör och kan justeras. Överdraget är ej öppningsbart och torkas/desinficeras av.

Artikel	Bredd	Djup	Tjocklek	Öppningsmått hål	Pris
OSCSO	500 mm	560 mm	20 mm	(Diameter) 200 mm	3499 kr/st
OSCSO1	500 mm	430 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 130 mm x 300 mm	3499 kr/st
OSCSO2	450 mm	470 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 150 mm x 225 mm	3499 kr/st

Dyna av tryckavlastande gel, för hygien och duschstol



DGHSSP

Enkel att använda

Montering: Placera geldynan på dusch eller hygienstolen. Öppningen åt samma håll som stolens sits öppning. Konturerade sidan av gelmattan ska vara mot brukaren. Kardborrebandets hona placeras på stolens sits och hanen på geldynas undersida – gör samma för båda kardborrebanden. Kan även användas utan kardborreband, detta beror på stolens sits yta. När gelmattan tas av stolen, dra försiktigt i kardborrebanden. Geldynan kan spolas av och/eller torkas/desinficeras av. Passar bland annat Ocean. Levereras med två dubbelhäftande kardborreband.

Artikel	Bredd	Djup	Tjocklek	Öppningsmått hål	Pris
DGHSSP	490 mm	560 mm	13 mm	(Bredd x Djup) 270 mm x 165 mm	1995 kr/st

Dyna tryckavlastande gel, för hygien & duschstol inkl. överdrag – Universal!



DGCP01818WC, DGCP01820WC, DGCP01818CVB, DGCP01820CVB

Överdrag avtagbara – avtorkbart, antiglid, kardborreband och tvättbara i maskin

Dyna av tryckavlastande gel för hygien och duschstol. 19mm tjock gel. Universal mått. Gelet är uttagbart ur överdraget. Överdraget är av inkontinens material, typ Dartex med antiglid. Gelet desinficeras/spritas av, överdraget tvättas i maskin på max 60 grader skonsam tvätt, neutralt tvättmedel och/eller torkas av med desinficerings medel. Endast luft torka / dropp torka. Spännen inkluderat för bästa fastsättning. Ingår 4 st kardborreband som placeras runt sitsen.

Montering: Placera geldynan på sitsen, kontrollera att hålet ligger bra mot stolens hygienuttag. Spänn fast geldynan med spännena runt ryggrören och sitsen.

Artikel	Bredd	Djup	Tjocklek	Öppningsmått hål	Pris
DGCP01818WC	450 mm	450 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 200 mm x 240 mm	3095 kr/st
DGCP01820WC	450 mm	500 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 200 mm x 240 mm	3195 kr/st

Artikel	Bredd	Djup	Extra information	Pris
DGCP01818CVB	450 mm	450 mm	Överdrag avsedd för art.nr: DGCP01818WC	955 kr/st
DGCP01820CVB	450 mm	500 mm	Överdrag avsedd för art.nr: DGCP01820WC	955 kr/st

Dyna tryckavlastande gel, för hygien & duschstol utan överdrag – Universal!

DGCP1616

Dyna av tryckavlastande gel för hygien och duschstol. 19mm tjock gel. Universal mått. Gelet har ej överdrag. Gelet desinficeras/spritas av eller spolas av.

Montering: Placera geldynan på sitsen, kontrollera att hålet ligger bra mot stolens hygienuttag. Nyttja bifogade "Grip Strips" antiglid/fixeringsband.



Artikel	Bredd	Djup	Tjocklek	Öppningsmått hål	Pris
DGCP1616	400 mm	400 mm	19 mm	(Bredd x Djup) 200 mm x 305 mm	Feb-2021

Fotskydd med gel för dusch och hygienstol



INVSCFP

Fotskydd med gel för dusch- och hygienstol, rullstol etc. Tryckavlastande och komfort samt enkel användning.

Montering: Lägg fotskyddet av gel på fotplattan med blåa sidan uppåt. Spänn fast med kardborrebanden runt stolens fotplatta. Upprepa samma montering för båda fotplattorna. Passar bland annat Ocean.

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Pris
INVSCFP	180 mm	160 mm	20 mm	1831 kr/par

Fotskydd med gel – hel fotplatta för dusch och hygienstol



INVSCFP1P

Fotskydd med gel - hel fotplatta för dusch- och hygienstol, rullstol etc. Tryckavlastande och komfort samt enkel användning.

Montering: Lägg fotskyddet av gel på fotplattan med blåa sidan uppåt. Spänn fast med kardborrebanden runt stolens fotplatta. Passar bland annat Ocean.

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Pris
INVSCFP1P	370 mm	165 mm	20 mm	1895 kr/st

Bålstöd med gel



INVSCLP

Bålstöd med gel. Ger tryckavlastning och komfort för existerande bål stöd. Enkel användning.

Montering: Placera bålstödet av gel över dusch/hygienstolens bålstöd, kardborrebandet ska vara från brukaren och gelet mot brukaren. Spänn fast med kardborrebanden på bålstödet baksida. Upprepa momentet för båda sidor. Passar bland annat Ocean.

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Pris
INVSCLP	270 mm	165 mm	20 mm	1845 kr/par

Gel för huvudskydd/nackstöd



INVSCHR

Gel för huvudskydd/nackstöd. Tryckavlastande och komfortabelt samt enkel användning.

Montering: Placera huvudskyddet av gel på huvudstödet/nackstödet med blåa sidan mot huvudet. Spänn fast med kardborrebanden på huvud/nackstödet baksida. Passar bland annat Ocean.

Artikel	Längd	Bredd	Höjd	Pris
INVSCHR	250 mm	100 mm	20 mm	1295 kr/st

Dyna av tryckavlastande gel, för toaletsitsen



GTSOM, GTSOM1, GTSOM2

Dyna av tryckavlastande gel, för toaletsitsen. Levereras med inkontinens överdrag som är avtorkbart och antiglid på undersida. Enkel användning.

GTSOM – universal toaletsits.

GTSOM1 – passar bland annat Ifö Sign mjuksits.

GTSOM2 – passar bland annat Supporter sits.

Montering: Placera geldynan på toaletsitsen. De 4st kardborrebanden sätts fast runt/under sitsen. Överdraget är ej öppningsbart och torkas/desinficeras av.

Vi gör kundunika versioner för att utöka sortimentet och skapa standardversioner, med största sannolikhet med samma pris – kontakta Salubrious AB.

Artikel	Bredd	Djup	Tjocklek	Öppningsmått (Diameter)	Pris
GTSOM	380 mm	400 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 185 mm x 290 mm	3195 kr/st
GTSOM1	370 mm	440 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 220 mm x 300 mm	3195 kr/st
GTSOM2	350 mm	395 mm	20 mm	(Bredd x Djup) 210 mm x 275 mm	3195 kr/st

Toaletsits dyna av gel



HLSO

HLSO – passar bland annat Hi-Loo 6+10

Toaletsits dyna av gel för avlastning och komfort. Levereras parvis. Överdraget är av inkontinens material, typ Dartex. Överdraget spritas av. Skydd för kardborreband på insidan av toasitsen. Antiglid samt 4st kardborreband för fixering.

Montering: Placera de två stycken toaletsits dynorna på toaletsitsen och spänn fast med kardborreband (2st per halva).

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
HLSO	335 mm x 75 mm	20 mm	1745 kr/par

Toaletsitsdyna av gel med tillhörande överdrag – Universal!



DGTP1635WC, DGTP1635CV

Överdrag avtagbara – avtorkbart, antiglid, kardborreband och tvättbara i maskin

Toaletsits dyna av gel för avlastning och komfort. Universal mått. Levereras parvis. Gelet är uttagbart ur överdraget. Överdraget är av inkontinens material, typ Dartex. Antiglid samt 4st kardborreband för fastsättning. Gelet desinficeras/spritas av, överdraget tvättas i maskin på max 60 grader skonsam tvätt, neutralt tvättmedel och/eller torkas av med desinficerings medel. Endast luft torka / dropp torka.

Montering: Placera de två stycken toaletsits dynorna på toaletsitsen och spänn fast med kardborreband (2st per halva).

Artikel	Information	Mått	Tjocklek	Pris
DGTP1635WC	Dyna inkl. överdrag	380 mm x 95 mm	15 mm	1795 kr/par

Artikel	Extra information	Mått	Pris
DGTP1635CV	Överdrag avsedd för dyna - DGTP1635WC	380 mm x 95 mm	795 kr/par

Huvudskydd/nackstöd justerbart/inställningsbart med gel för huvud och panna



Information

- Justerbart/inställningsbart huvudskydd/nackstöd med gel för huvud och panna.
- Passar rullstolar och dusch/hygienstolar exempelvis Ocean. Två avtagbara gelskydd för skydd uppe på huvudet ingår alltid.
- Inställbar i längdled och vinkel på pannskyddet.
- Enkel knapp för "swing away"/uppfällning och "klick" för låsning.
- Kan även användas på andra rullstolar och duschstolar, där det går att montera en adapterplatta – se fil "Selection and fitting guide".

Om osäker kring adapter, kontakta Salubrious AB för olika versioner. Se filen "Selection and fitting guide" för adapter såsom 19mm kula, 25mm kula, 19mm Whitmyer, 25mm kula Comfort Company.

Montering: Kontakta Er hjälpmedelstekniker, förskrivare eller annan ansvarig person för installering och justering av produkt. Detta för att erhålla rätt inställning för just Er. Använd Loctite på skruv för bästa montering och hållbarhet.

Pannskydd alla varianter: höjd 40 mm, bredd 190 mm (böjd bredd 200 mm), tjocklek 13 mm.

Pannskyddet kan justeras genom att böja mycket försiktigt.

Artikel	Höjd	Bredd	Tjocklek	Information	Pris
SRAFS510	130 mm	260 mm	13 mm	Inkl. adapter 25 mm kula	5695 kr/st
SRAFS512	130 mm	305 mm	13 mm	Inkl. adapter 25 mm kula	5845 kr/st
SRAFS514	130 mm	360 mm	13 mm	Inkl. adapter 25 mm kula	5995 kr/st
SRAFS510-19	130 mm	260 mm	13 mm	Inkl. adapter 19 mm kula	5695 kr/st
SRAFS512-19	130 mm	305 mm	13 mm	Inkl. adapter 19 mm kula	5845 kr/st
SRAFS514-19	130 mm	360 mm	13 mm	Inkl. adapter 19 mm kula	5995 kr/st

Kontakta Salubrious AB om annan adapter önskas på produkten.

Tillbehör till huvudskydd/nackstöd/pannskydd

Artikel	Information	Pris
19HRA	Förminska 25mm adapter, för att passa på 19mm kula.	995 kr/st
SCHA	Adapter led och 25 mm kula, till Ocean Ergonomiska huvudstödshållare – för kombination med SRAFS510/512/514	695 kr/st
SRFSMB	Adapter platta 25mm kula – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRFSMBS	Adapter platta 19mm kula – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRFSMBW	Adapter platta 19mm kula Whitmyer – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRFSMBC4	Adapter platta 25mm kula Comfort Company – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRFSMBP	Adapter platta Permobil huvudstöd – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRFSMBR	Adapter platta R82 anatomiskt huvudstöd – för kombination med SRAFS	695 kr/st
TX0012	Adapter platta Cross 5/Prio huvudstöd – för kombination med SRAFS	695 kr/st
SRAFS	Pannskydd, gel polstring, justerbar "arm" och anföringsplatta till adapter. Som exempelvis SRAFS512 exkl. huvudstödet. Se filen Selection and fitting guide första sidan.	4395 kr/st
SREFS	Förlängning av "arm" mellan pannskydd & huvudskydd. Se filen Selection and fitting guide	1090 kr/st

Fler tillbehör finns i filen: Selection and fitting guide på vår hemsida, under Gel Ovations. Exempelvis förlängning, huvudskydd etc.

Tryckavlastning för bälten och selar

Kardborreband



GSC8

Montering: Gelplattan sätts fast med kardborrebandet.

Exempel på användning: För att göra bälte- och selanvändning mer komfortabel och/eller förebygga tryck. Kardborrebandet ska vara IFRÅN den yta som önskas skyddas.

Artikel	Information	Längd	Bredd	Tjocklek	Pris
GSC8	Passar bälten/selar med omkrets upp till 60 mm	200 m	140 mm	10 mm	663 kr/par

2-punkts positioneringsband av neoprene (innehåller ej gel)



2-punkts positioneringsband för våta miljöer av neoprene (innehåller ej gel). Finns i tre olika versioner. OBS – det är inga säkerhetsbälte och ska inte användas under transport. Bandets totala längd alla versioner: 1397mm

Montering: Banden sätts på lämpligt ställe på duschstolens ram, med hjälp av spännena. Justera sedan längden på banden till önskvärdt mått kring brukaren. Se till att neoprene materialet kommer mot brukarens hud för komfort. För sedan ihop plastspännet för att enkelt kunna öppna och låsa positioneringsbandet.

Artikel	Mått	Tjocklek	Pris
A2PBS	125 mm x 66 mm	5 mm	1199 kr/st
A2PBM	150 mm x 80 mm	5 mm	1199 kr/st
A2PBL	170 mm 93 mm	5 mm	1199 kr/st



Salubrious
Good Medical

KONTAKTA OSS

Box 5021
448 51 Tollerød
Sverige

Tel
E-post

Hemsida
Webbshop

+46 (0)31-730 58 00
rehab@salubrious.se

www.salubrious.se
www.goodmedical.se