

# -AireRx Fallskyddsmadrass-

## BRUKSANVISNING AVSER AIRERX FALLSKYDDS- MADRASS LEVERERADE EFTER 2024-01-01

AireRx Fallskyddsmadrass är tänkt att placeras där risk för fallskador finns, oftast vid säng. Produkten används för/av brukare/patienter som har dålig balans och fallrisk finns. AireRx Fallskyddsmadrass hjälper till med att minska risken för fallskador, minska risken och kraften vid fall. AireRx Fallskyddsmadrass nyttjas bland annat vid vårdboende, vård i hemmet och sjukhus - d.v.s. i olika vårdmiljöer.

Nedan finner Ni information kring placering, rengöring, förvaring och tillbehör.

Information återfinns även på vår hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se). Produktens etikett innehåller information samt ett batchnummer (tillverkningsnummer). Batchnumret önskas vid kontakt med Salubrious AB.

Förväntad livslängd minst 5 år.

Art. nr: AR200



### Innehållsförteckning:

Placering	2
Rengöring	3
Förvaring	3
Övrig information	4



## Placering:

1. Placera Er fallskyddsmadrass där Ni avser att använda produkten. I vanligaste fall vid sängens långsida.
2. Fallskyddsmadrassens gråa sida ska vara uppåt och dess blå nedåt mot golvet.
3. Gör en okulär besiktning av madrassen innan användning. Så produkten är i gott nyttjande skick.
4. AireRx Fallskyddsmadrass är avfasad på alla sidor, så Ni väljer själva vilken sida som ska vara mot sängen (OBS - gråa sidan uppåt). Vi rekommenderar starkt en långsida.
5. Ifall Ni har ett halt golv och inte fallskyddsmadrassens undre blåa antiglidmaterial är tillräckligt, så finns det två kardborreband på fallskyddsmadrassens blåa undersida. Sätt kardborreband (hane) på lämpligt ställe på golvet och placera fallskyddsmadrassens kardborreband (hona) ovanpå. På detta sätt sitter fallskyddsmadrassen fast på hala golv.
6. Ni väljer själva om AireRx Fallskyddsmadrass ska finnas vid säng hela dygnets tid eller vid egna angivna tider. (Se lagerhållning, för korrekt förvaring)



## Rengöring:

1. Rengöring av AireRx Fallskyddsmadrass kan göras med tvällösning och/eller desinfektionsmedel. Undvik starka klorbaserade rengöringsmedel. Eftertorka väl, då det finns risk för missfärgning. Är Ni osäkra på just Ert desinfektionsmedel, kontakta Salubrious AB alternativt prova i ett avgränsat område; exempelvis ett hörn.
2. Kontrollera att AireRx Fallskyddsmadrass ser hel ut och inte har några hål i gråa och blåa överdragsväven. Om det finns hål, så laga hålet innan tvätt. Detta för att undvika fukt, mögel etc. inne i madrassen. Gällande lagning rekommenderar vi att Ni lagar med CLEANPatch-V, som är avsett för detta ändamål - kontakta Salubrious AB.
3. Då AireRx Fallskyddsmadrass har en svetsad överdragsväv, så kan Ni torka, svabba eller spola av överdragsväven.
4. Låt torka helt innan Ni åter nyttjar produkten eller lagerhåller.

## Förvaring:

1. AireRx Fallskyddsmadrass lagerhålls utvikt med grå sidan uppåt alternativt ihopvikt med blå sidan utåt. Ihopvikt nyttja kardborrebandet för att hålla ihop fallmadrassen. Lagerhållning sker i rumstemperatur. Vid längre tids lagerhållning (veckor/månader) rekommenderar vi att produkten lagerhålls utvikt med grå sidan uppåt. Ifall Ni förvarar fallmadrassen kortare tid och med blå sidan utåt, kan veck uppstå på den gråa sidan. Vecken lägger sig av sig själv efter en tid.
2. AireRx Fallmadrass transporteras antingen i väska (art.nr: AR201) alternativt med kardborrebandets handtaget. Vid transport är den blåa sidan utåt. Väskan förenklar och skyddar AireRx Fallskyddsmadrass vid lagerhållning samt underlättar transport.

## Övrig information/Att tänka på:

- Undvik skarpa föremål, som kan skadas AireRx Fallskyddsmadrassens överdragsväv.
- Om AireRx Fallskyddsmadrass varit i kall miljö (lägre än rumstemperatur), vid exempelvis transport. Låt fallskyddsmadrassen återfå rumstemperatur innan användande, för att produktens egenskaper ska vara maximala.
- AireRx Fallskyddsmadrass kan inte garantera ett 100 %-igt motverkande fallskador, då alla personer har olika förutsättningar, miljön vid fallet kan se olika ut och fallhöjd.
- Ifall Ni kör upp produkter med hjul på madrassen exempelvis rullstol, rullator etc. Kontrollera så ej vassa föremål såsom exempelvis stenar fastnat i däcken och kan förstöra väven. Avlägsna produkten med hjul från fallmadrassen efter Ni är klara.
- Att kontrollera fallskyddsmadrassens status/kondition: Tryck ner skummet och skapa en grop. Material skall återgå till normalt läge (plant) inom 5 minuter.
- Observera att viss snubbelrisk kan finnas vid fallmadrassens yttre kanter.
- Vid eventuella fel/tillbud kontakta Salubrious AB - kontaktuppgifter se nedan.
- Fallskyddsmadrass skall ej användas där risk finns för glödande cigaretter eller öppen låga.

---

Återvinning av fallskyddsmadrassen enligt  
Er kommuns återvinningsrutiner.  
Fallskyddsmadrassen består av skum, vinyl,  
kardborreband samt lottor av glasfiber.

Återvinn transport emballaget i avsett  
återvinningskärl.

