

Made in Sweden

AireRx Low Friction Överdrag

för nack- och huvudstöd

Bruksanvisning

AireRx Low Friction överdrag nedan benämns ALF

1. Kontrollera att du har rätt avsett ALF överdrag till rätt produkt.
Se artikelnummer på etikett på ALF överdrag kontra produktblad på Salubrious AB's hemsida – www.salubrious.se
2. Läs på produktbladet / info om din produkt ska ersätta existerande överdrag eller sättas utan på existerande överdrag.
3. När produkten ska ersätta existerande överdrag bör du avlägsna det gamla överdraget för att sedan trä på det nya ALF överdraget.
4. Viktigt att se till att rätt sida på ALF överdraget hamnar på rätt sida på produkten.
Se notering BAK/NER på överdragsetiketten.
5. ALF överdraget ska ej sitta löst och bör kontrolleras efter påsättning. Ej heller för hårt spänt ifall överdraget har kardborreband fästning. Detta för att maximera överdragets egenskaper.
6. Ska du i stället trä på ALF överdraget utanpå existerande överdrag bör du först se till att det existerande överdraget sitter på ordentligt och ej löst. Gör sedan punkt 4 och 5.
7. Tvätt instruktioner finns på ALF överdragets etikett.
8. Lycka till med ALF överdraget. Om frågor eller funderingar vänligen kontakta Salubrious AB

Varje enskilt AireRx Low Friction artikelnummer/version, är avsett att monteras på det angivna huvudstöd/nackstöd/armstöd som anges i produktbladet (artikelnummer/art. benämning).

Därav så är montering av AireRx Low Friction överdrag avsett att monteras på just dessa huvudstöd/nackstöd/armstöd, för erhållande av önskade egenskaper.

