


-Relax Duo-Profile-

Relax Duo-Profile är tillverkad och avsedd för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den Relaxdyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB.

Avsedd användning: Relax sortiment av sittdynor är utformade för att ge stöd, viktfördelning och tryckfördelning för rullstolsbrukare och personer med begränsad rörlighet, som tillbringar långa perioder sittande. Är avsedd att möta specifika behov hos en patient/brukare som använder rullstol och annat sittande. Kontroll av uppfyllnad ska göras regelbundet.

Maxvikt brukare: 130 kg.

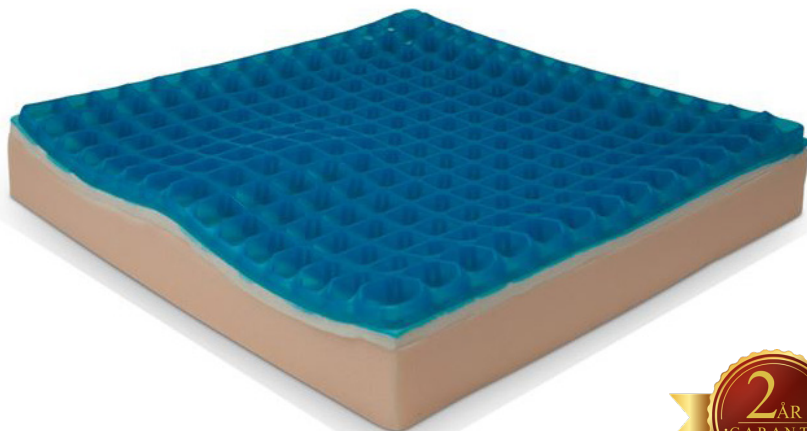

Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3
Silikonrengöring	4


-Relax Duo-Profile-

Placering:

Relax Duo-Profile är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Relax Duo-Profile gör följande:

1. Hitta etiketten med texten "back" och en pil på överdraget. Dynstommens markeringar för rätt placering återfinns på produkten. (Dynan exkl. överdrag)
2. Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget, där "back" och pil är markerade, hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Pilen skall peka uppåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.
3. Nu är Din dyna klar att användas!

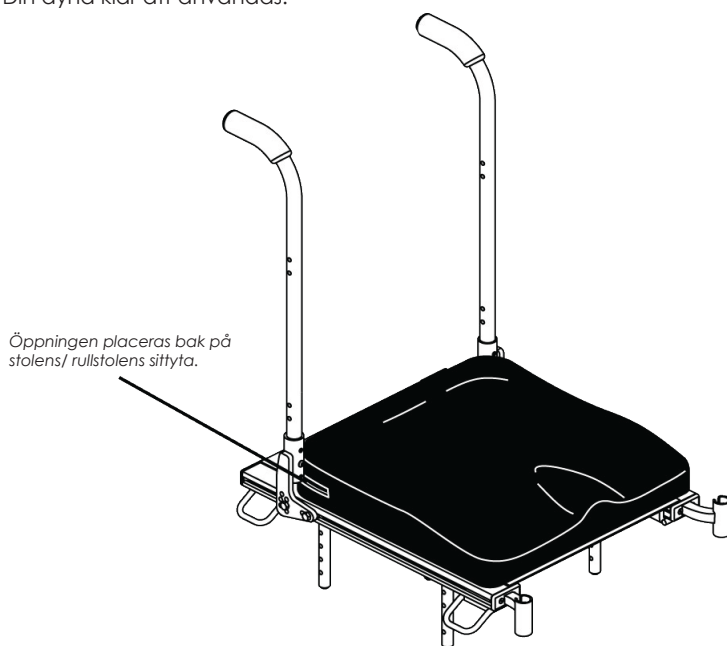

Förvaring:

Relax Duo-Profile bör förvaras i rumstemperatur på en ren, torr plats och plant i sin låda när den inte används. Används dynan under extrema temperaturer (mindre än -20°C eller mer än $+40^{\circ}\text{C}$), vänta då tills dynan återfått rumstemperatur innan användning.

-Relax Duo-Profile-


Rengöring:

Överdrag:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan. Används ett avtorkningsbart överdrag på Relax Duo-Profile kan man torka av dynan med mild tvållösning eller desinfektionsmedel direkt på överdraget om så önskas.
2. Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur. Använd ej blekmedel.

Dynstomme:

1. Rengör dynstommen (den inre plastfilmen) med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr).
2. Låt dynan lufttorka eller torka i torkskåp på låg värme.
3. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, stäng dragkedjan. Observera att markeringen "bak" på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som öppningen på överdraget.

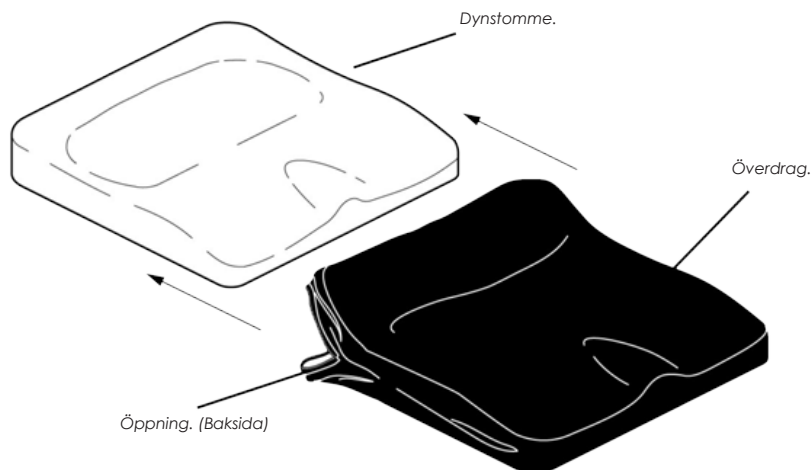



Salubrious AB har avtal med Rangells med avseende på elektronikskrot med mera. I övrigt hänvisar vi till gällande miljölagstiftning och de rutiner i de kommuner där produkten ska utangeras. Gällande emballage så är vi anslutna till Reparegistrert för att minimera miljöpåverkan. Kartong återvinns som returkartong.

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall.



Box 3100 • 443 03 Lerum • Besöksadress: Skiffervägen 2G, 443 61 Stenkullen • Sverige • Växel: 031 - 730 58 00
E-post: info@salubrious.se • Hemsida: www.salubrious.se • Webbshop: www.goodmedical.se