


-Relax-

Gelcell och Gelcell G2

Relax är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den Relaxdyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB.

Avsedd användning: Relax sortiment av sittdynor är utformade för att ge stöd, viktfördelning och tryckfördelning för rullstolsbrukare och personer med begränsad rörlighet, som tillbringar långa perioder sittande. Är avsedd att möta specifika behov hos en patient/brukare som använder rullstol och annat sittande. Kontroll av uppfyllnad ska göras regelbundet.

Maxvikt brukare: 130 kg.

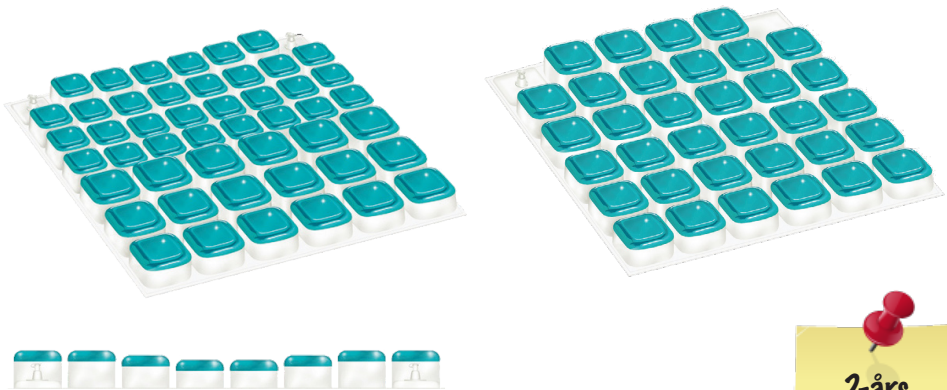

Innehållsförteckning:

| | |
|--|---|
| Placering | 2 |
| Förvaring | 2 |
| Rengöring | 3 |
| Inställning för GELCELL OCH GELCELL G2 | 4 |

-Relax-

Gelcell och Gelcell G2


Är du osäker på vad just din dyna heter finner du dess namn på dynöverdragets sida.

Placering:

Relax är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Relax gör följande:

1. Hitta etiketten med texten "back" och en pil på överdraget. Dynstommens markeringar för rätt placering återfinns på produkten.
2. Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget, där "back" och pil är markerade, hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Pilen skall peka uppåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.
3. Nu är Din dyna korrekt placerad, gå till sida 4 i denna manual!

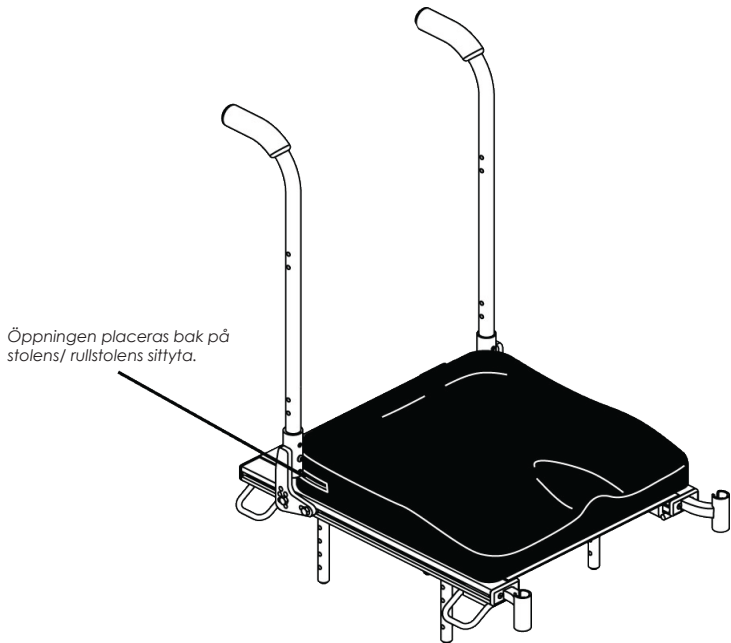


Förvaring:

Alla Relaxdynor bör förvaras i rumstemperatur på en ren, torr plats och plant i sin låda när den inte används. Används dynan under extrema temperaturer (mindre än -20°C eller mer än +40°C), vänta då tills dynan återfått rumstemperatur innan användning.

Är du osäker på vad just din dyna heter finner du dess namn på dynöverdragets sida.

Rengöring:


1. Öppna överdraget och dra ut dynan.
2. Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.
3. Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänks dynan ner i vatten/ spolas av, **MÅSTE** ventiler/ ventilen stängas helt!
4. Låt dynan torka!
5. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, förslut kardborrebandet/dragkedjan. Är ventiler och dragkedja/kardborreband åt samma håll, då är överdraget rätt applicerat. Håll koll på pilen!

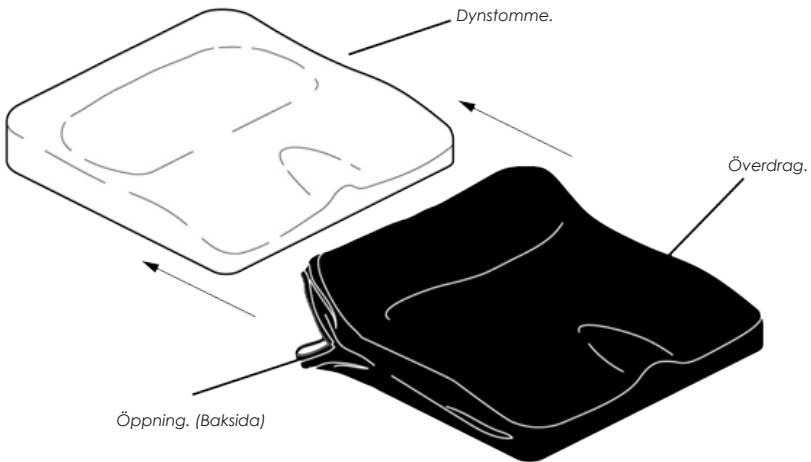


Gäller Relax Gelcell (1 ventil):

1. Blås upp Relax Gelcelldynan med medföljande pump tills den känns hård. (bild 1) OBS! Överpumpa ej, kontinuerlig överpumpning kan skada produkten. (bild 2)
2. Se till att dynan är placerad rätt med ventilen bakåt på sitsen.
3. Innan brukaren sätter sig på dynan, tryck på ventilen för att frigöra luft tills det slutar pysa, d.v.s. tills lufftrycket uppnått atmosfäriskt tryck. (bild 3)
4. Brukaren som ska använda dynan sätter sig därefter i önskad sittställning.
5. Kläm på ventilen igen och frigör luft i ca. 2 sek (räkna 1001-1002) eller så länge det krävs för att brukaren ska uppnå det mest komfortabla sittandet. Efter avtappning av luft formar sig dynan efter brukaren. (bild 4)
6. Placera din hand under den mest beniga delen under brukaren. Det måste vara minst 1,5-2 cm luft mellan brukarens benigaste del och dynans botten. (bild 5)
7. Relax Gelcell är nu korrekt inställd!
8. Kontrollera lufftrycket med jämna mellanrum vilket kan göras enkelt genom handtestet i punkt 6. (bild 5)


Inställning för Relax Gelcell och Relax Gelcell G2:

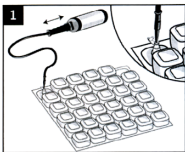


Pumpa in luft i dynan med handpumpen.

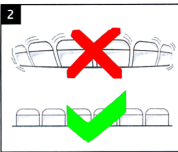


Överpumpa ej dynan!

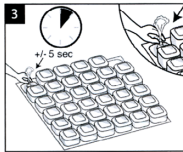

Släpp ut luft utan brukare på dynan, tills det slutar pysa.

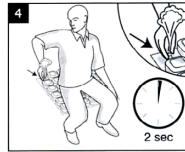

Frigör luft i 2 sek. med brukaren på dynan.

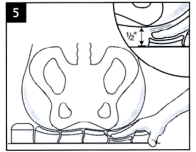

Minst 1,5 cm luft mellan gelen och dynans botten.

För Relax Gelcell G2 (2 ventiler):

Relax Gelcell G2 har två kamrar (hö/vå, därför två ventiler) kan man enkelt individanpassa dynan då brukaren är i behov av positionering eller korrigerig. Positionering och korrigerig sker med hjälp av olika luftmängd i de två kamrarna. Följ punkterna 1-8 ovan, för båda sidorna av dynan. **OBS! Släpp ut luft kortare än 2 sekunder då cellerna på Relax Gelcell G2 är lägre.** (De här dynorna kan självklart användas av brukare som inte behöver sådan individanpassad tvåkammerpositionering.)



Salubrious AB har avtal med Rangells med avseende på elektronikskrot med mera. I övrigt hänvisar vi till gällande miljölagstiftning och de rutiner i de kommuner där produkten ska utgraderas. Gällande emballage så är vi anslutna till Reparegistrert för att minimera miljöpåverkan. Kartong återvinns som returkartong.

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall.

Att tänka på:

- Se alltid till att dynan är korrekt uppumpad så att brukaren därmed blir hjälpt av dynan.
- Brukaren ska aldrig nudda botten, d.v.s. "sitta igenom" dynan. Då är den felanpassad och fyller ej sin funktion.
- Om dynan används av olika brukare, använd denna instruktion varje gång eftersom nivån av lufftryck varierar mellan varje individ.
- Kontinuerlig överpumpning kan skada produkten. Nyp ej i plåsten som omsluter silicongelet. Den här informationen återfinns på medföljande pump och på vår hemsida: www.salubrious.se.

