



Salubrious

box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige  
växel: 031-710 44 70 • fax: 031-710 44 75  
e-post: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se)  
hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

**NOTERA! Använd INTE fläkten medan dynan laddas.**




2016v02

## Minimanual



Packa upp din AireRx och sätt på medföljande överdrag. Det är viktigt att dragkedjan sitter på baksidan av dynan och att hålet för laddaren sitter på framsidan.

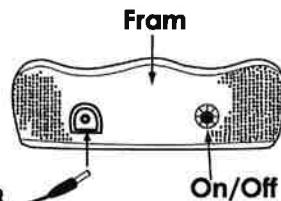

Dynan ska laddas fullt innan du använder den första gången. Laddningstiden är 8-11 timmar för användning 12-14 timmar\*.  
När lampan på laddaren lyser grönt är dynan är fulladdad. Om dynan är oanvänd under en längre tid (ca. 2-3 månader) eller batteriet är helt urladdat kan laddningstiden vara betydligt längre.

\* Fullt batteri = 16-20 timmars användning.



**Laddningsindikator**  
Blinkande rött ljus = Initierar laddningscykel  
Rött ljus = Laddning  
Grönt ljus = Fulladdad

TIPS: Ladda dynan t.ex. över natten



**Tvätttråd**  
Överdrag: Tvättas i tvättmaskin i 60°C  
Dyna: Torka med en fuktig trasa och en utspädd tvållösning eller desinfektionsmedel.  
För mer information se bruksanvisningen.